

Használati utasítás LAICA HI3011 Ultrahangos párasítóhoz.

Forgalmazó: Silko&Co Kft. www.laica.hu

Köszönjük, hogy ezt a LAICA készüléket választotta! Az alábbiakban leírtak betartása a feltétele annak, hogy a készülék hosszú távon is problémamentesen működjön, ezért:

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és tartsa be azokat. Ez a használati utasítás a termék egy tartozéka ezért őrizze meg és tárolja bármikor elérhető helyen.

Az ön új ultrahangos párasítója biztosítja a helyiség levegőjének ideális páratartalmát, és azonnali megkönnyebbülést hoz mind a gyermekek, mind a felnőttek légzésében.

Hogy légző rendszerünk jól működjön, fontos, hogy minél tovább legyünk egészséges környezetben.

A párasító segít elérni az alváshoz szükséges megfelelő feltételeket, így éjszakánként jól aludhat. A hálószoba legyen kényelmes és csendes, nem túl meleg, és megfelelő páratartalmú, így elkerülhető az orrdugulás. (az ideális ha a helyiség páratartalom 40-60% között van) Az ön párasítója hideg gőzt bocsát ki, ezáltal alkalmas a hálószobába, a gyerekszobába, a nappaliba, vagy a dolgozószobába. Az ultrahangos technológia jóvoltából a készülék zajtalan, és hosszú párologtatásra képes, ami kb. 8-9 órán keresztül tart.

Általános figyelmeztetések

Elektromos készülék használata esetén mindig vegye figyelembe az alapvető szabályokat:

- A készüléket használat után, tisztítás, és a tartozékok cseréje vagy eltávolítása előtt húzza ki a konnektorból.
- A készülék kábeleit ne rángassa, és a készüléket ne rántsa ki a konnektorból.
- Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbálja meg hozzáérni, hanem azonnal húzza ki a csatlakozóból.
- A készüléket soha ne tegye vízbe, vagy más folyadékba.
- A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül, és gyermek, rokkant vagy fogyatékos ember ne használja.
- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján. A nem rendeltetésszerű használat helytelennek, és ezért veszélyesnek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó meghibásodásért.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen, és semmilyen látható sérülés nincs rajta. Ha ebben bizonytalan, forduljon az eladóhoz.
- Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná megjavítani. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.
- A készüléket hőforrástól tartsa távol.
- Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a keze száraz, mikor a kábelt bedugja, vagy kihúzza a konnektorból, vagy megnyomja a gombot.
- A készüléket mindig a készülék alján feltüntetett feszültséggel használja.
- A párasítót ne tegye ki esőnek, napsütésnek, magas hőmérsékletnek, ne tegye számítógép vagy más elektromos berendezés közelébe.
- A túlmelegedést elkerülendő a csatlakozót mindig húzza ki.
- A készüléket mindig húzza ki a konnektorból, ha a párasító nincs használatban

MEGJEGYZÉSEK

(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

KIEMELT FONTOSSÁGÚ ELJÁRÁSOK a LAICA PÁRÁSÍTÓ ÜZEMELTETÉSÉHEZ!

Annak érdekében, hogy LAICA hideg párasítója még hosszabb távon biztosítsa Ön és családja számára a ideális a páratartalmat az életterükben, kérjük fokozottan (de nem csak ezeket kizárólagosan) tartsa be az alábbi eljárásokat az készülék üzemeltetése, ill. tisztítása során .

Készülék üzemeltetése során :

A víztartályba kizárólag hideg csapvizet töltsön. A párologtatni kívánt vízbe ne kerüljön illatszer, gyógyszer, vagy bármilyen más anyag.

Ha az otthonában lévő víz túl kemény, tehát nagy mennyiségben van benne ásványi só, használjon helyette desztillált vizet, vagy pld. a LAICA kávé & tea vízszűrő által szűrt/lágyított vizet, ez által a vízkövesedés periódus kitolódik.

Aroma terápia esetén kizárólag 100 % természetes illóolajat,(mesterséges színezék mentes) töltsön a párasítónak erre a célra rendszeresített illóolaj tartályába.

A párasító készülék nem alkalmas sós (salvus) vizes párasításra. Sós (salvus) vízzel történő kezelésre (pl. asztma esetére) **a Laica inhalátor készülékeket javasoljuk használni.** Az inhalátor készülék közvetlenül a kezelendő területre hat és nem keletkezik só páralecsapódás a szobában sem.

Amikor az összes víz elpárologott, a gőz nem folyik tovább, ekkor azonnal kapcsolja ki a készüléket.

Javasoljuk, hogy a 8 órás működést követően legalább 2 órát hagyja a készüléket pihenni!

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás vagy bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból a készüléket. A víztartály dugóját hagyja lazán becsavarva, így a tömítés nem sérül „kevésbé öregszik el” így nem okoz csepegést.

A tartályt öblítse ki vízzel. Ne használjon vegyi anyagot, vagy súrolószert.

A vízkő lerakódást az átalakítóból (a 11-es alkatrész) egy enyhén vizes, és ecetes ronggyal óvatosan dörzsölve tisztítsa át, ezt követően egy vizes ronggyal törölje át, majd alaposan törölje szárazra .

A művelet végén bizonyosodjon meg róla, hogy az összes tartozék száraz.

FIGYELEM: Az átalakító, vagy bármely alkatrész vízkövesedéséből, oxidációjából eredő meghibásodásokra a jótállás és / vagy szavatossági igényt kénytelenek vagyunk elutasítani.

Mivel vízkövesedés megakadályozás a fogyasztó feladata (a vízkövesedés természetes folyamat) a gondos és szakszerű tisztítás és karbantartás mellett elkerülhető.

A készülék gondos tisztítása különösen fontos a szezonális leállás esetén, mivel a vizesen elcsomagolt készülékben a tárolási időszakban vízkövesedést vagy oxidációt okoz, ez által megakadályozza a készülék helyes működést a következő szezon kezdetén.

Különleges figyelmeztetések

- A készüléket addig ne dugja be, míg a tartály nincs rendesen a főegységbe helyezve.
- A párasítót ne használja víz nélkül. Mindig hideg csapvizet használjon, ami mentes minden illatszertől, gyógyszertől és minden más anyagtól.
- A párasítót mindig kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból mielőtt a víztartályt eltávolítja a főegységből.
- A készüléket lapos, szilárd és vízálló felületre helyezze, a csatlakozót hőforrástól tartsa távol.
- A készülék nyílásait ne takarja le, és ne tegyen beléjük semmit. (pl. a gőzszugár, a párasító alja)
- A készülék működése közben ne nyúljon az átalakítóhoz, vagy a tartályban lévő vízhez.
- **Ha a víztartály teljesen kiürült, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. Töltse meg újra a tartályt, és a „Használati utasítások” bekezdés alapján járjon el.**
- A párologtatóba ne öntsön vizet.
- Ne öntsön vizet közvetlenül a készülék alapzatába.

Figyelem! Az elektromos vezetékhez soha ne nyúljon. Ha a készülék meghibásodott, forduljon az eladóhoz.

Figyelem! A készülék nem játék, hanem otthoni használatra készült párasító.

A párasító tartozékai

1. Víztartály
2. Tartály megemelő mélyedés
3. Gőzpárologtató nyílás
4. víztartály feltöltő nyílás
5. Alap készülék
6. Tekerő kapcsoló ki/ be ill. gőz intenzitás beállító
7. Működés indikátor fény
8. Éjszakai világítás
9. Éjszakai világítás ki / bekapcsoló.
10. Lebegő szenzor
11. Ultrahangos gőzzé alakító
12. Illóolaj tároló rekesz
- 13-14. Hálózati csatlakozó adapter gyengeáramú csatlakozóval

Használati utasítások

- 1) Addig ne kapcsolja be a párasítót, míg a tartályt nem töltötte meg vízzel.
- 2) Az óramutató járásával ellentétesen csavarja le a gőztartály feltöltő nyílás kupakját ami a tartály alján található. A tartályba töltsön hideg csapvizet (kb. 1,8l). A vízbe ne kerüljön illatszer, gyógyszer, vagy bármilyen más anyag. még jobb ha LAICA vízszűrő kancsó által szűrt/lágyított vizet használ ez által a vízkövesedés periódus kitolódik.
- 3) A tartály kupakját helyezze vissza az óramutató járásával megegyező irányba csavarva, és ellenőrizze, hogy a víz nem szívárog-e. Ha a tartályt megtöltötte, a párasítót vízszintes felületre helyezze.
Ha az otthonában lévő víz túl kemény, tehát nagy mennyiségben van benne ásványi só, használjon helyette desztillált vizet.

MEGJEGYZÉSEK

(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

- 4) A tartályt helyezze az alapzatba, figyelemmel arra, hogy mindenhol jól illeszkedjen. Dugja be a dugót a készülékbe, Fordítsa el a gombot (6.) be a gombot az óramutató járásával megegyező irányba tekerve növelheti a gőzölgés intenzitását. (a kék jelző fény jelzi a párasító működését).
- 5) **Mikor az összes víz elpárolgott, a gőz nem folyik tovább, (a kék jelző fény pirosra változik) ekkor azonnal kapcsolja ki a készüléket.**

Javasoljuk, hogy a 8 órás működést követően legalább 2 órát hagyja a készüléket pihenni!

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás vagy bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból a készüléket.

Távolítsa el a fedelet, a tartályt vegye ki az alapzattól a foggantyújánál fogva, csavarja le a kupakot, és távolítsa el az összes megmaradt vizet. A tartályt öblítse ki vízzel. Ne használjon vegyi anyagot, vagy súrolószert.

Egy puha ronggyal óvatosan szárítsa meg a tartályt és a tartály dugóját.

A párasító alapzatát ne tegye vízbe, nedves ronggyal tisztítsa, majd alaposan szárítsa meg. Legyen nagyon óvatos, amikor a lebegő szerkezet és az átalakító környékét tisztítja, mert ezek nagyon érzékenyek és könnyen sérülnek. Ha a készülék nincs használatban, ne hagyjon benne vizet. Azt ajánljuk, hogy egy héten egyszer tisztítsa meg a készüléket, vizes oldattal és egy csepp ammóniával, hagyja ázni kb. 20 percig, majd alaposan öblítse ki vízzel, és a készülék minden részét puha ronggyal szárítsa meg. A lerakódott vízkövet az átalakítóból egy félig vízbe, félig ecetbe áztatott ronggyal óvatosan dörzsölve tisztítsa ki, aztán egy vizes ronggyal törölje ki, majd alaposan szárítsa meg. A művelet végén bizonyosodjon meg róla, hogy az összes tartozék száraz. A tartály dugóját hagyja lazán, így a tömítés nem sérül.

Speciális helyzetek

Ha a következő esetek előfordulnak:

- 1) Az ON/OFF gomb nem kezd el világítani
 - Ellenőrizze, hogy be van-e dugva
 - Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a gomb
- 2) Ha nincs porlasztó spray:
 - Ellenőrizze a vízszintet
 - Ellenőrizze, hogy a párasító szilárd, vízszintes felületen van-e
 - Ellenőrizze, hogy az átalakítón nincs-e vízkőlerakódás
 - Ellenőrizze, hogy az átalakító nem sérült-e
- 3) Páralecsapódás a párasítón, vagy a szoba ablakán
 - A gőzsugár túl nagy a szoba méretéhez vagy az aktuális pára tartalomhoz képest
- 4) Vízkőlerakódás a párasítón vagy annak falain
 - használjon desztillált vizet

Műszaki adatok

Feszültség: 230V AC 50HZ 16W Technológia: ultrahangos Hideg gőz kibocsátás: kb. 200ml +/- 50 ml / óra

Tartály kapacitás: 1,8l Biztonsági berendezés: lebegő szonda

Gőzkibocsátás időtartama: 8-9 óra Max. működési zaj: kisebb mint 35dB

CE Ez a készülék otthoni használatra készült. Az alkalmazása, amit a készüléken található CE jel bizonyít, az EEC 2004/18-as rendeletére, az elektromágneses kompatibilitásra, valamint az EEC 2006/95-ös rendeletére, az elektromos anyagok bizonyos feszültség alatti használatára vonatkozik.

Ez a berendezés egy elektromos készülék, amit a mai technikai tudás alapján teszteltek, így bizonyítva, hogy nem okoz gondot, ha más készülékhez közel helyezkedik el, és hogy a használati utasítást követve használata biztonságos. Ha működésbeli problémák lépnek fel, ne használja tovább a készüléket, és ha szükséges, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.

Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE)

A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétként dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet

MEGJEGYZÉSEK

(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készüléket, vagy egyes részeit helytelenül használják.

Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.

Megbízható eszközök a LAICA-tól a mindennapos csecsemő és gyerek gondozáshoz



Kompresszoros inhalátor
hálózatról működik.



Alsó és felső légutak
kezelésére: felnőtt és
gyerek maszkal.



Ultrahangos extra
csendes hordozható
inhalátor. Elemes




MEGJEGYZÉSEK

- (1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
- (2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.



Ideális páratartalom a gyerekszobában = Pihentető nyugodt alvás a kicsiknek.
Ultrahangos hidegpárásító aromaterápia és váltakozó éjszakai fény a LAICA-tól.

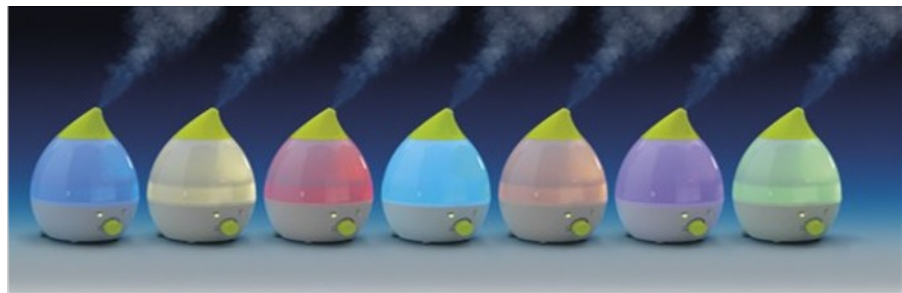

MEGJEGYZÉSEK

- (1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
- (2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

LAICA vízszűrő kancsó bi-flux szűrőbetéttel

A kancsó használatának előnyei:



Kényelmes

...mert megszűnik a cipekedés.



Költséghatékony

...nem kell a palackos vizekre költeni, így megtakaríthatunk.



Környezetbarát

...nem terheljük műanyag palackkal a környezetet.



Kíméli a kisgépeket

...a vízkövesedési problémáktól.



Kávéhoz, teához

...javítja a víz állagát, így a forró italok még finomabbak lesznek.



MEGJEGYZÉSEK

- (1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
- (2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó¹ neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1158 Budapest, Késmárk u.16. III. emelet

Forgalmazó posta címe: Silko&Co Kft.

Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu

Termék megnevezése: HI3011 Ultrahangos párasító

Termék típusa: HI3011W

Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország

A termékre a magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLLÁSI feltételek:

Forgalmazó a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termék szavatosságot vállal.

A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a **vásárlás napjától számított 1 év.**

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célből szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).

Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy **MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT** is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.

ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.

Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:

A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,

A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás, nem megfelelő elem használata) következménye

FONTOS TUDNIVALÓK:

A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22.) Korm. Rendelet tartalmazza. A fogyasztó az alábbi sorrendben kérheti kártalanítást az eladótól - kijavítást, kicserélést vagy árszállítást, illetve elállhat a szerződéstől (pénz visszafizetés).

A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy a Forgalmazóhoz, vagy a közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez is intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.

Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét, ill. keletkezésének az okát.

A jótállási kötelezettség kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. KIVÉTELT KÉPEZNEK a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt megvásárlásától számított **1 évre jótállást** vállal.

Vásárlás dátuma:.....

Üzleti eladóhelyi pecsét:.....

Javítási, ill. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon ide:

LAICA szerviz átvételi pont.

Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el e-mailben a gyorsabb ügyintézés érdekében . e-mail cím:

[szerviz@silko.hu](mailto:serviz@silko.hu)

Silko&Co.Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet
Készülék átvétel személyesen: minden héten kizárólag
szerdá 9-16 között.

Csomagküldés esetén használja ugyan ezt a címet.

MEGJEGYZÉSEK

(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.