

Használati utasítás és szavatosság

Termék: digitális hőmérő TH3106

Forgalmazó: **Silko&Co Kft.** 1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet www.laica.hu

CE 0434 (Dir. 93/42/EEC): A Készülék megfelel az Európai „MEDIKÁL KÉSZÜLÉKEKRE” vonatkozó szabványoknak.

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos helyen.

Digitális hőmérő LCD kijelzővel a könnyű leolvasásért. 60 másodperc alatt méri meg a test hőmérsékletét. Gyors és pontos, hangjelzéssel jelzi, ha a mérés befejeződött. Az utolsó mérés eredményét tárolja, hogy tudja hasonlítani a később mért értékekkel. Használata rendkívül egyszerű, a sérülés elkerülése érdekében praktikus táskában van tárolva. A mérőfej mosható, és a készülék automatikusan kikapcsol.

Általános figyelmeztetések

- 1) A testhőmérséklet mérése csak ellenőrzés, nem jelent sem diagnózist, sem kezelést. Ha bármilyen szokatlan értéket észlel, azonnal forduljon orvosához! Semmilyen körülmények között ne változtassa meg az orvosa által felírt gyógyszeradagot.
- 2) A hőmérőt ne szorítsa meg, hajlítsa el, ejtse le vagy törje össze.
- 3) Gyermekektől elzárva tartandó.
- 4) Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, vagy hőforrásnak. Tiszta, száraz helyen tartsa.
- 5) A hőmérőt ne mártsa vízbe vagy más folyadékba, mivel csak a mérőfej vízálló.
- 6) A hőmérőt hónaljban, szájbán vagy végbélnyílásban lehet használni. Ne használja fülön keresztül.
- 7) Mérés előtt ne fogyasszon forró vagy hideg ételt, italt, ne dohányozzon, és ne zuhanyozzon.

Az elemek behelyezése/cseréje

- 1) Az elemfedőt húzza a jelzett irányba.
- 2) Egy hegyes tárgy segítségével távolítsa el az elemet.
- 3) Az új elemet a pozitív oldalával felfelé, a negatív oldalával lefelé helyezze be.
- 4) Helyezze vissza a fedelet. Ha a kijelzőn a „ ” és a „ ” jel jelenik meg, akkor az elemeket ki kell cserélni.
- 5) Az elemet ne a háztartási szemétkébe, hanem szelektív hulladékgyűjtőbe dobja.

Használati utasítások

Minden használat előtt és/vagy után a mérőfejet alkohollal fertőtlenítsen le.

Szájon és végbélen keresztüli használat

- 1) Az O/I gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést ad, majd pár másodpercre megjelenik az összes ikon a kijelzőn. Ezután a kijelző az utolsó mért értéket mutatja az L °C felirat mellett. Mikor a °C felirat elkezd villogni, a készülék használatra készen áll.
- 2) A mérőfej elhelyezése:

szájban: a mérés előtt 5 percig tartsa csukva a száját, hogy a hőmérséklet stabilizálódjon. A hőmérőt helyezze a nyelv alá, majd tartsa csukva száját, míg a mérés befejeződik. A szájbán mért átlaghőmérséklet 37°C.

végbélnyílásban: A mérőfejet kenje be valamilyen zselés, vízben oldódó oldattal. Ne használjon vazelin. A hőmérőt 60 másodpercig tartsa a végbélben kb. egy centi mélyen. Az átlaghőmérséklet itt 37.5°C.

hónaljban: hónaljban való használatához kövesse az alábbi utasításokat.

- 1) A hónaljat törölje szárazra. A mérés előtt a karját 5 percig tartsa a csípőhöz szorítva, így a hőmérséklet stabilizálódik. A hőmérőt helyezze a hónalja alá, és karját szorítsa a mellkasához. (Így megakadályozható, hogy a szobahőmérséklet befolyásolja az eredményt.)
- 2) Az O/I gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést ad, majd pár másodpercre megjelenik az összes ikon a kijelzőn. Ezután a kijelző az utolsó mért értéket mutatja az L °C felirat mellett. Mikor a °C felirat elkezd villogni, a készülék használatra készen áll.

A hőmérséklet kb. 60 másodperc után stabilizálódik. Az átlaghőmérséklet a hónaljban 36.5°C.

- 3) Mikor a készülék hangjelzést ad, távolítsa el a hónaljtól, a mérés befejeződött. Az eredményt a kijelzőn olvashatja. Ha a készülék használaton kívül van, 10 perc után automatikusan kikapcsol (addig a kijelzőn az eredmény látható). Ha ezt nem várja meg, a készüléket az O/I gombbal kapcsolhatja ki.

Karbantartás

A hőmérő mérőfejét minden használat előtt és/vagy után tisztítsa meg alkoholos ronggyal, vagy más fertőtlenítőszerrel. Minden más tisztítószer használata károsíthatja a készüléket. A hőmérőt magát száraz ronggyal törölje át. A hőmérőt ne tegye vízbe vagy más folyadékba. Soha ne használjon vegyi anyagot vagy súrolószert a tisztításhoz. A mérőfej a hőmérő legtörékenyebb része, ezért tisztítását nagy gonddal végezze. A kijelzőt soha ne tisztítsa alkohollal. A hőmérőt közvetlen napfénytől elzárva, száraz, hűvös helyen tartsa. Ne fertőtlenítsen vagy főzze ki a hőmérőt. A hőmérőt a tokjában tartsa.


Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE)

A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétként dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák az emberek egészségét, és az is, hogy a készülék vagy egyes részeit helytelenül használják. Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.

Termék szavatosság érvényesítése: Kérjük a vásárlás dátumát a nemzetközi füzetbe 2. oldalán feljegyezni, ill. (Retailer's stamp) helyen a bolti pecséttel hitelesíttetni.

A forgalmazó a termékre fogyasztó általi vásárlás esetén a vásárlástól számított 2 év –re termékszavatosságot vállal. Amit a kereskedő bélyegzője és aláírása, valamint a blokk igazol, amit éppen ezért kérünk megőrizni, szíveskedjen. A szavatossági igény nem érvényesíthető nem a rendeltetésnek megfelelő használat, nem fogyasztó általi vásárlás (céges vásárlás), szakszerűtlen kezelés, gondatlanság, vagy helytelen használat miatt történt meghibásodás esetén. Csak a mellékelt tartozékokat használja. Ha ezeken kívül más tartozékot használ, a garancia érvényét vesztheti.

Soha ne nyissa ki a készüléket. Ha ez mégis megtörténik, a garancia automatikusan érvényét veszti. A garancia nem vonatkozik a gyorsan kopó, vagy letéphető tartozékokra, és az elemre (ha alaptartozék). A szavatosság a vásárlástól számított két éven belül jár le. Ezután bárminemű javítást meg kell fizetni. A 2 éves garancia idején, vagy az ezután történő javításról bővebb információt a szerviz@silko.hu A szavatossági ideje alatt történő javítás vagy csere semmilyen fizetési kötelezettséget nem von maga után. Bármilyen hiba esetén forduljon a viszonteladóhoz, a terméket ne küldje vissza közvetlenül a LAICA-hoz. A nyilvános helyen történő használat tilos. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett, emberben, vagyontárgyban vagy háziállatban történt kárért, amit a használati útmutató a készülék üzembe helyezésére, használatára és karbantartására vonatkozó előírásainak nem betartása okoz. A LAICA célja, hogy folyamatosan tökéletesítse termékeit, ezért fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül akár részben, akár egészben a gyártási követelményeknek megfelelően megváltoztassa termékeit. Ezért sem a LAICA, sem a viszonteladó nem vonható felelősségre. **Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét, ill. keletkezésének az okát.**

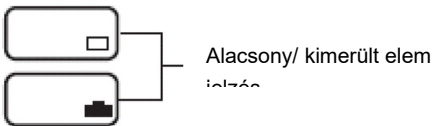

Műszaki adatok

Figyelem! A használati utasítást figyelmesen olvassa el. BF típusú berendezés.

Mérési tartomány: 35.5°C-42°C
Pontosság: +/- 0.1°C
Kijelző: folyadékkristályos
Elem: 1 db 1.5 V LR/SR-41 típusú elem
Elem készenléti ideje: kb. 100 óra folytonos használat
Elem fogyasztása: 0.15 mW
Súly: 11 g
Méret: 133x22x13 mm
Működési feltételek: 10°C-42°C (60+/-20% páratartalom)
Tárolási feltételek: 10°C-50°C (60+/-10% páratartalom)

Javítási, ill. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon ide:

LAICA szerviz átvételi pont.

Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el e-mailben a gyorsabb ügyintézés érdekében. e-mail cím:

szerviz@silko.hu

Silko&Co.Kft

1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet

Készülék átvétel személyesen: minden héten

kizárólag szerda 9-16 között.

Csomagküldés esetén használja ugyan ezt a címet.

MEGJEGYZÉSEK

(1) A jelen használati útmutató a Silko & Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket